



Медицинская насадка

Хирургия 4

- 👁 **АБСЦЕССЫ**
- 👁 **ФЛЕГМОНЫ** – гнойные воспаления тканей
- 👁 **КАРБУНКУЛЫ** – гнойные и болезненные воспаления подкожных тканей
- 👁 **ГИДРАДЕНИТ** – воспаление потовых желез
- 👁 **ФУРУНКУЛЫ** – чирии, нарывы

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

АБСЦЕССЫ, ФЛЕГМОНЫ, КАРБУНКУЛЫ, ГИДРАДЕНИТ и ФУРУНКУЛЫ

1

А. Если какие-то из перечисленных повреждений, кроме нарывов, расположены где-либо на теле или лице, кроме областей **головы**, затрагивающих головной мозг, прикладывайте насадку к поверхности кожи в пораженной области на протяжении **2 мин** на каждые 10 см² поверхности при **переменной настройке (V)**.

Б. Если повреждение находится **на голове**, обрабатывайте пораженную область **5 мин** при **50 Гц** на каждые 10 см² поверхности. Ультразвук должен быть **ВЫКЛЮЧЕН**.

2

А. Нарыв сначала должен быть **вскрыт**, затем, до начала процедуры, его необходимо промыть **коллоидным серебром**.

Б. Обрабатывайте нарыв **5 мин** при **1000 Гц**, затем еще **5 мин** при **50 Гц**.

3

Проводите процедуру **“Общая 3 (кровь)”** вместе с шагом 1 или шагом 2.

Дважды в день до исцеления.