

17 мин






Неврология 5

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА – абстинентный синдром.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
 Прикладывайте КОНЧИК зондовой насадки к каждой точке, показанной на рисунке, и к точкам НА ОБОИХ ушах	1000 Гц	1 мин на точку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели перед тем, как проводить еще один курс процедур.

