

37 мин +



Дерматология 1

- ЭКЗЕМА
- НЕЙРОДЕРМИТ
- АЛЛЕРГИИ
- ПСОРИАЗ

В случае мягких форм экземы, псориаза и кожной сыпи смотрите также процедуру “Меридианная насадка 3”.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
2	Локтевые ямки	5 Гц	5 мин на точку
3	Бедренные артерии	5 Гц	5 мин на точку
4	Печень	5 Гц	2 мин на точку
5	Почки	5 Гц, затем 50 Гц	2 мин на точку для каждой частоты
6	Сканируйте пораженную область	1000 Гц	1 мин на 10 см ²

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели перед следующим курсом, если он будет необходим. В дальнейшем повторяйте лечение каждые 3 месяца, если заболевание будет проявляться снова.

Эту процедуру необходимо выполнять вместе с процедурой “Общая 4 (программа 1)”. Если пораженная область находится на **волосистой части головы**, используйте **меридианную** насадку для сканирования пораженного участка. “Цветинками” можно слегка прикоснуться к коже.

