

## Травматология 9

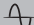

### ▶ АРТРИТ БЕДРЕННОГО СУСТАВА

#### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

15 мин



NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Вертел (бедренной кости)	5 Гц, 50 Гц, затем переменная настройка (V)	1 мин на точку для каждой частоты
2	4 точки вокруг вертела, в 5 см друг от друга		

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите процедуру через **6 месяцев**, если будет необходимо.

