

8 мин



Общая 1 (голова)

- **МИГРЕНИ**
- **ОБМОРОКИ**
- **СТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ** – снижение когнитивной функции
- **АТЕРОСКЛЕРОЗ** – жировые отложения внутри артерий
- **ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ ДАВЛЕНИЕ**
- **ИШЕМИЯ** – дефицит кровоснабжения головного мозга [см. также “Кардиология 1”]

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку. **Ультразвук ВЫКЛЮЧЕН**  для точек 1, 2 и 3.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Виски (оба) 	50 Гц	1 мин на точку
2	Лобная кость (обе стороны) 		
3	Подзатылочная зона (обе стороны) 		
4	Синокаротидная зона (обе стороны)		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день, пока не заметите улучшений. После этого **дважды в день на протяжении еще 7 дней**, затем перерыв на 2-3 недели перед следующим курсом, если в нем будет необходимость.

