

2 - 5 мин



Дерматология 2

- ▶ **БОРОДАВКИ**
- ▶ **ПОДОШВЕННЫЕ БОРОДАВКИ**
- ▶ **БОРОДАВЧАТЫЕ ПРЫЩИ (КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК)***

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую насадку**.

БОРОДАВКИ

- 1 Поместите насадку на бородавку так, чтобы насадка соприкасалась с кожей. Облучайте **2 мин** при **50 Гц**.

Один раз в день в течение 4-5 дней. Бородавка немедленно начнет подсыхать, и, в зависимости от её размера, значительно уменьшится к четвертому или пятому дню и к этому моменту должна сама отпасть с кожи. Если она не отпадает, тогда продолжайте лечение до тех пор, пока остатки бородавки не отпадут.

!!! НЕ пытайтесь оторвать бородавку от кожи, так как это может вызвать сильное кровотечение и привести к побочным проблемам.

📺 В случае **контагиозного моллюска** можно использовать ту же процедуру, что и от бородавок. Однако, поскольку они имеют инфекционную природу, **насадка ДОЛЖНА быть тщательно простерилизована после процедуры перед тем, как использовать ее снова!**

ПОДОШВЕННЫЕ БОРОДАВКИ

- 2 Поместите насадку на бородавку так, чтобы насадка соприкасалась с кожей. Облучайте **5 мин** при **5 Гц**.

Один раз в день, пока бородавка полностью не исчезнет. Важно понимать, что при этой процедуре бородавки убиваются, начиная с поверхности кожи вглубь по направлению к корню.

После 3-4 дней тело начнёт выталкивать к поверхности кожи мёртвые части бородавки. Эти мёртвые части легко удалить, погрузив поражённое место на 5 минут в тёплую воду и затем осторожно соскребив мёртвые кусочки ногтем большого пальца. Окружающая кожа, которая также может быть заражена, считается вместе с мёртвой частью бородавки.

В зависимости от того, насколько глубоко бородавка проросла, она должна полностью сойти в течение приблизительно 7-10 дней. Если она не сошла полностью за это время, продолжайте лечение до тех пор, пока она совсем не исчезнет.

!!! Важно удостовериться, что бородавка удалена полностью и снизу - только новая молодая кожа. Если хоть какая-то часть бородавки останется, бородавка вырастет снова.

