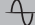



Пульмонология 1

- ▶ ПНЕВМОНИЯ
- ▶ ПЛЕВРИТ
- ▶ БРОНХИТ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
2	Надключичные ямки	5 Гц	2 мин на точку
3	Подключичные ямки	5 Гц	1 мин на точку
4	3 точки по обе стороны позвоночного столба у лопаток	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты
5	2 точки под лопатками	5 Гц	2 мин на точку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней.

24 МИН

