

Дерматология 4

10 мин ±



Медицинская
насадка



Эстетическая
насадка

ДЕРМОГРАФИЗМ



ПРОЦЕДУРА А (УТРО)

Общая 3 (кровь)

Через день, как предписано в этом руководстве пользователя.

ПРОЦЕДУРА Б (ВЕЧЕР)

Используйте **эстетическую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте поврежденную область, держа насадку частично над поверхностью кожи, чтобы избежать дальнейшего раздражения	1000 Гц	5 мин на 10 см ²

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Проделайте все 10 раз **процедуру А**, и проводите **процедуру Б** до тех пор, пока пораженная область не очистится.

Настоятельно рекомендуется проводить **процедуру А**, как минимум, **4 раза в год** в профилактических целях и для поддержания устойчивого благополучия.

