

25 мин





Урология и нефрология 5

👁 **ЭНУРЕЗ** – ночное недержание мочи.

👁 **ЭНКОПРЕЗ** – недержание кала.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** и **меридианную** насадки.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Рукоятка грудины	5 Гц	1 мин на точку
2	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	
3	Солнечное сплетение	50 Гц	2 мин на точку
4	Мочевой пузырь	5 Гц	
5	Промежность	50 Гц	
6	Основание полового члена (у мальчиков), уретра (у девочек)	5 Гц	5 мин на сторону
7	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба, крестцовый отдел	1000 Гц	
8	Наложите меридианную насадку на ухо (оба уха)	50 Гц	3 мин на ухо

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующий курс, если будет необходимо. Далее **повторяйте** лечение с перерывами между курсами при необходимости.

