

16 мин



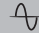

Педиатрия 1

СОМАТИЧЕСКОЕ БИОСТИМУЛИРОВАНИЕ

Для младенцев и детей младшего возраста смотрите процедуру "Меридианная насадка 2".

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

НО.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Рукотка грудины	5 Гц	1 мин на точку
2	4 ^я межреберный промежуток, слева от грудины		
3	Миндалевидные железы		
4	Локтевые ямки		
5	Правое подреберье		
6	Эпигастрий (надчревые)		
7	Левое подреберье		
8	Сканируйте вдоль обеих сторон позвоночного столба	1000 Гц	2 мин на сторону
9	Почки	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 7 дней.

