

14 мин





Педиатрия 3

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Мочевой пузырь	5 Гц	2 мин на точку
2	Сфинктер мочевого пузыря		
3	Почки		
4	Промежность		
5	Сканируйте вдоль обеих сторон позвоночного столба нижнюю часть спины	1000 Гц	2 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 10 дней. В дальнейшем при необходимости повторяйте каждые 2 месяца.

