

18 мин

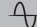



## Гастроэнтерология 2

- 🔍 **ХОЛЕЦИСТИТ** – воспаление желчного пузыря.
- 🔍 **ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ** – нарушение работы желчного пузыря.

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Желчный пузырь	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты
2	2 точки по обе стороны от первой точки, в 5 см от нее		
3	Пупок		
4	Точка посередине между точками 1 и 3		
5	Середина желудка		
6	Грудино-ключично-сосцевидная мышца, правая	5 Гц, затем 50 Гц	2 мин для каждой частоты
7	Сканируйте справа от позвоночного столба, от низа лопатки до середины спины		

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели, затем следующий курс, если будет необходимо.

