

25 мин



Стоматология 1

- 👁 **ГИНГИВИТ** – воспаление десен.
- 👁 **ГИНГИВОСТОМАТИТ*** – воспаление ротовой полости и десен.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
1	Сонные артерии	5 Гц	5 мин на точку
2	Центры щек, напротив задней стороны десен	50 Гц	5 мин на щеку

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
3	Вставьте зондовую насадку в рот и приложите к пораженной области	1000 Гц	5 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Двух раз в день в течение 10 дней должно быть достаточно.

- 👄 В случае гингивостоматита выберите несколько точек вдоль верхней и нижней десен в качестве точки 3 и обрабатывайте каждую точку по 2 минуты.

