

Кардиология 3

- 👁️ ГИПЕРТОНИЯ
- 👁️ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ
- 👁️ ШЕЙНАЯ МИГРЕНЬ
- 👁️ БОЛЬ В ГЛАЗАХ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте медицинскую насадку. Ультразвук **ВЫКЛЮЧЕН**  для пунктов 2 и 4.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	1 мин
2	Сканируйте лобно-височные зоны 	50 Гц	1 мин на сторону
3	Сонные артерии	5 Гц	1 мин на точку
4	Подзатылочные ямки 	50 Гц	1 мин на точку
5	2 точки с каждой стороны 4 ^{го} шейного позвонка	5 Гц	1 мин на точку
6	2 точки с каждой стороны 7 ^{го} шейного позвонка	5 Гц	1 мин на точку
7	Верхний край середины трапецевидных мышц	5 Гц	1 мин на точку
8	Почки	50 Гц	5 мин на точку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с перерывом на 3 недели после каждого курса, пока не будет замечено улучшение.

23 МИН

