

20 мин





Гинекология 6

👁 **ГИПОГАЛАКТИЯ** – недостаточное количество молока.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую насадку**.

№	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте соски и область вокруг них мелкими круговыми движениями на расстоянии 0,5 см от кожи	50 Гц	3 мин на сторону
2	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба напротив лопаток	1000 Гц	2 мин на сторону
3	Надключичные ямки	5 Гц	5 мин на точку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели перед другим курсом. Затем повторите курс, делая процедуры **через день**. Далее проводите процедуру **один раз в неделю** в течение периода лактации.

