

Травматология 11



12 МИН



▶ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Боковые поверхности суставов под лодыжкой	5 Гц, 50 Гц, затем переменная настройка (V)	1 мин на точку для каждой частоты
2	Фронтальная проекция сустава		
3	Задняя проекция сустава		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите процедуру через **6 месяцев** при необходимости.

