

14 МИН



Оториноларингология 9

- ▶ ЛАРИНГИТ
- ▶ ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ*

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Hz	ВРЕМЯ min
1	Голосовые связки	50 Гц	2 мин на сторону
2	Сканируйте заднюю сторону шеи с обеих сторон от позвоночного столба	1000 Гц	5 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Делайте дважды в день ежедневно в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующий курс, если в этом все еще будет необходимость.

Актёры и певцы, повредившие свои голосовые связки, должны также провести **один** курс процедуры **“Общая 4 (программа 1)”** вместе с вышеописанным лечением.

Для непрерывного ухода за голосовыми связками певцам и актёрам рекомендуется проводить вышеуказанный курс лечения вместе с процедурой **“Общая 4 (программа 1)”** каждые 4 месяца.

