

15 мин



Гастроэнтерология 4

ЯЗВА ЖЕЛУДКА

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Гц	ВРЕМЯ мин
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	1 мин
2	Эпигастрий (надчревьё)	50 Гц	2 мин на точку
3	Середина левого подреберья		
4	Левое подреберье вдоль подмышечной линии		
5	Середина желудка		
6	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба от низа лопаток до середины спины	1000 Гц	3 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующий курс, если будет необходимо.

