

5 мин +



Меридианная насадка

## Меридианная насадка 3

 **ЛЕГКИЙ ПСОРИАЗ**

 **ЛЕГКАЯ ЭКЗЕМА**

 **КОЖНАЯ СЫПЬ**



Смотрите также **общие замечания** по использованию **эстетической** насадки.

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **меридианную** насадку, установив ее на **1000 Гц**.

**1** В случае **псориаза** на волосяной части головы, следуйте процедуре “**Меридианная насадка 1**”.

**2** В случае **легкой экземы** на **лице** и/или **шее**, мягко поглаживайте все лицо и/или шею **меридианной** насадкой (**глаза при этом закрыты**) в течение **5 мин**. **НЕ** направляйте луч лазера в глаза!

**3** Во всех других случаях **псориаза**, **кожной сыпи** или **легкой экземы**, мягко поглаживайте пораженный участок сначала при **1000 Гц** в течении **5 мин**, затем при **50 Гц** в течении **5 мин**.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Два раза в день**. Проводите лечение, пока кожа не **очистится полностью**.



Очистите световоды меридианной насадки **коллоидным серебром** или **чистым спиртом** после применения во избежание распространения инфекции.