

Травматология 5



12 МИН



ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Эпикондиллярные области (передняя и задняя стороны сустава)	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты
2	Локтевой сгиб		
3	Кончик локтя		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день до полного выздоровления. Повторите процедуру через 3 недели, если будет необходимо.

