

Гинекология 4

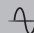

4 мин



ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте соски и область вокруг них мелкими круговыми движениями на расстоянии 0,5 см от кожи	50 Гц	2 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 7 дней перед предполагаемым сроком родов. Повторите **после** родов. После этого проведите **7 процедур** через день.

