

16 мин





## Гинекология 5

### ▶ МАСТИТ

#### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую насадку**.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте соски и область вокруг них мелкими круговыми движениями на расстоянии 0,5 см от кожи	1000 Гц	3 мин на сторону
2	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба напротив лопаток	1000 Гц	5 мин на сторону

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 4 недели, затем следующий курс, если будет необходимо. Это лечение лучше всего проводить вместе с **процедурой "Общая 3 (кровь)"**.

