

30 мин ±





## Травматология 2

**МИОЗИТ** – воспаление мышц.

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Обрабатывайте пораженные мышцы с интервалами в 5 см	Переменная настройка (V)	5 мин на точку
2	А. Сканируйте обе стороны позвоночника, напротив пораженной области	1000 Гц	5 мин на точку
	Б. При поражении мышц ног сканируйте обе стороны пояснично-крестцового отдела позвоночника		

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Дважды в день** до полного выздоровления.

