

12 мин

Медицинская
насадкаЗондовая
насадка

Оториноларингология 1

▶ **РИНИТ** – воспаление слизистой оболочки носа (все формы).

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Крылья носа	5 Гц	2 мин на точку
2	Проекция миндалин	50 Гц	2 мин на точку

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
3	Поместите кончик насадки в ноздрю	1000 Гц	2 мин на ноздрю

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы, если будет необходимо.

