

26 мин +



Хирургия 5

- 👁 ОЖОГИ
- 👁 ОБМОРОЖЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Гц	ВРЕМЯ мин
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
2	Надключичные артерии	5 Гц	3 мин на точку
3	Локтевые артерии	5 Гц	3 мин на точку
4	Бедренные артерии	5 Гц	3 мин на точку
5	Сканируйте области вдоль позвоночника напротив ожога	1000 Гц	1 мин на 10 см длины
6	Пораженная область	День 1-4, 1000 Гц День 5-8, переменная настройка (V)	2 мин на 10 см ²

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день, пока не наступит улучшение.

