

24 мин

Медицинская
насадкаЗондовая
насадкаМеридианная
насадка

Оториноларингология 5

👁 **ОТОСКЛЕРОЗ** – потеря слуха.

!!! **coMra-терапия** не всегда излечивает отосклероз, но с помощью этой процедуры возможно добиться некоторого улучшения.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Δ	ВРЕМЯ Δ
1	Подключичные ямки	50 Гц	1 мин на точку
2	Позвочник	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на частоту
3	Сосцевидный отросток	5 Гц	3 мин на ухо

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Δ	ВРЕМЯ Δ
4	Вставьте зондовую насадку по направлению к барабанной полости	1000 Гц	2 мин на ухо

Используйте **меридианную** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Δ	ВРЕМЯ Δ
3	Наложите насадку на все ухо	1000 Гц	5 мин на ухо

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы, пока не будет достигнуто улучшение.

!!! Если процедуры проводятся на оба уха, воздействуйте на точки 1 и 2 только один раз..

