

18 мин





Травматология 3

- 👁️ **КЛЮЧИЧНЫЙ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ** – зажатое и бездеятельное плечо.
- 👁️ **ПОДАКРОМИАЛЬНЫЙ БУРСИТ** – воспаление синовиальной сумки.
- 👁️ **ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРИТ** – боль и ограниченное движение в плечевом суставе.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	2 точки в области акромиона (ость лопатки) на расстоянии 10 см, спереди и сзади	5 Гц, 50 Гц, затем 1000 Гц	1 мин на точку для каждой частоты
2	6 точек вокруг области акромиона (ость лопатки), спереди и сзади, в 5 см от первой точки	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день до полного выздоровления.

