



Медицинская
насадка

Хирургия 1

- ▶ **ПОРЕЗЫ** [в случае хирургических разрезов и травматических ран – см. “Хирургия 2”]
- ▶ **УШИБЫ**
- ▶ **РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ**

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

ОЖОГИ и ПОРЕЗЫ

- 1** Сканируйте прямо над поверхностью кожи в течение **3 мин** при **1000 Гц**.
- 2** Проводите процедуру “**Общая 3 (кровь)**” вместе с шагом 1.

Повторяйте **ежедневно**, пока не наступит улучшение.

УШИБЫ и РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ

- 1** Прикладывайте насадку непосредственно к поверхности кожи пораженной области и обрабатывайте **2 мин** при **5 Гц**, и затем **3 мин** при **50 Гц**.
- 2** Проводите процедуру “**Общая 3 (кровь)**” вместе с шагом 1.

Повторяйте **ежедневно**, пока не наступит улучшение.