



Медицинская насадка

## Хирургия 2

👁 **ХИРУРГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ**

👁 **ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОРЕЗЫ**

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

### ХИРУРГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ И ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОРЕЗЫ

- 1 Сканируйте поверхность пореза или послеоперационного шрама и 3 см поверхности кожи от его краев. **Дважды в день** при **1000 Гц** по **1 мин** на каждые 10 см<sup>2</sup> поверхности на протяжении **4 дней**. После этого повторите процедуру еще **4 дня** при **50 Гц**.
- 2 Проводите процедуру **"Общая 3 (кровь)"** вместе с шагом 1, также в течение **8 дней**.

Если рана все еще не начинает заживать, повторите всю процедуру в течение еще **8 дней**, используя **переменную настройку (V)** для шага 1.