

30 мин



Медицинская насадка

Зондовая насадка

Урология и нефрология 1

ПРОСТАТИТ – заболевание предстательной железы.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку, а также **зондовую** насадку с **обычной** оболочкой.

НО.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Гц	ВРЕМЯ мин
1	Мочевой пузырь	5 Гц	5 мин
2	Основание полового члена, спереди	5 Гц	1 мин на точку
3	Половой член, спереди		
4	Половой член, сзади		
5	Основание полового члена, сзади		
6	Яички	5 Гц	2 мин на точку
7	Промежность	5 Гц	2 мин
8	Бедренные артерии	5 Гц	5 мин на точку
9	Поместите зонд в анус (используйте обычную оболочку)	1000 Гц	5 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующий курс, если будет необходимо.

!!! Зондовая насадка должна быть **смазана** гелем **K-Y Jelly*** перед применением. **НЕЛЬЗЯ** использовать белый или непрозрачный крем, так как это заблокирует излучение.

*Можно использовать небольшое количество любого другого прозрачного геля или масла. Например, вазелинового масла.

