

1 час 29 мин ±



## Неврология 10

### РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ



При этом состоянии здоровья нужна не одна процедура. Поэтому предписанное здесь лечение состоит из пяти различных серий процедур, скомбинированных в 1 курс, как указано ниже.

#### ПРОЦЕДУРА А (РАННЕЕ УТРО И ВЕЧЕР)

##### Общая 5 (программа 2)

Делайте **дважды в день**: каждое утро и каждый вечер.

#### ПРОЦЕДУРА Б.1 (ПОЛДЕНЬ)

##### Общая 3 (кровь)

Делайте **один раз** в день, **через день**.

Чередуйте с процедурой **Б.2**

#### ПРОЦЕДУРА Б.2 (ПОЛДЕНЬ)

##### Кардиология 2

Делайте **один раз** в день, **через день**.

Чередуйте с процедурой **Б.1**

#### ПРОЦЕДУРА В (ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ УЖИНА)

##### Общая 4 (программа 1)


Делайте одну часть этой процедуры, как предписано, **один раз** в день, **каждый вечер в течение 6 дней**. Когда проделаете все шесть частей, начните сначала.

#### ПРОЦЕДУРА Г (ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ УЖИНА)

Используйте **медицинскую** насадку.

НО.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА $\text{Hz}$	ВРЕМЯ $\text{min}$
1	От копчика до затылка, с интервалами в 10 см	1000 Гц	1 мин на точку
2	С обеих сторон от позвоночника по разгибающим мышцам, с интервалами в 10 см	50 Гц	1 мин на точку

Делайте **один раз** в день, каждый вечер.

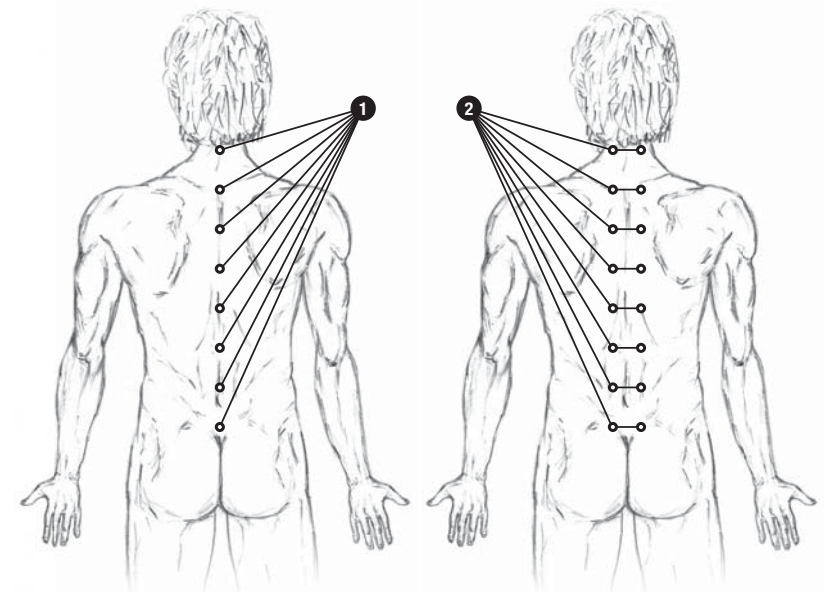

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Проводите этот курс процедур постоянно, то есть без перерывов, предложенных в других рекомендуемых курсах, пока не будет заметного улучшения. Далее проделайте этот курс в течение 21 дня, но только с 3 курсами процедуры **Общая 4 (программа 1)** и с перерывом в 2 недели между курсами этой процедуры.



Расстройства, при которых периодически появляются боли, необходимо дополнительно лечить местно, обрабатывая область боли и зону вокруг нее при **50 Гц 2 мин на точку**.

При **атрофии мышц** для соответствующих мышц необходима процедура на основе программы в **"Неврологии 13"**.