

16 МИН





## Гастроэнтерология 7

👁 **СЛИЗИСТЫЙ КОЛИТ** – симптом раздраженной толстой кишки

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	4 <sup>ый</sup> межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
A1-A8	Живот	50 Гц	1 мин на точку
3	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба от низа лопаток до нижней части спины	1000 Гц	3 мин на сторону

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 2 недели, затем следующие курсы с перерывами между ними до полного выздоровления.

