

13 мин

Медицинская  
насадкаЗондовая  
насадка

## Оториноларингология 7

- 👁 СИНУСИТ
- 👁 СЕННАЯ ЛИХОРАДКА

## ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Верхнечелюстные пазухи	5 Гц	3 мин на точку
2	Лобная пазуха	5 Гц	3 мин

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
3	Вставляйте зондовую насадку в носовые ходы	1000 Гц	2 мин на сторону

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы, пока не будет достигнуто улучшение.

