

12 мин

Медицинская  
насадкаЗондовая  
насадка

## Оториноларингология 6

👁 **СИНДРОМ МЕНЬЕРА** – глухота, головокружение, тошнота.

!!! Состояние **ухудшится** после первой процедуры, но спустя **12 часов** начнет улучшаться.

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку. **Ультразвук ВЫКЛЮЧЕН**  для точки 3.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сосцевидный отросток	5 Гц	2 мин на ухо
2	Сканируйте лобно-височные зоны	50 Гц	1 мин на сторону
3	Подзатылочные ямки 	50 Гц	1 мин на сторону

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
4	Вставьте зондовую насадку по направлению к барабанной полости	1000 Гц	2 мин на ухо

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы, пока не будет достигнуто улучшение.

