

## Травматология 12



- 👁 МАЛЫЕ СУСТАВЫ СТОП
- 👁 ПОДАГРА\*

## ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

30 мин



NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте верхнюю часть стопы как показано	5 Гц, 50 Гц, затем переменная настройка (V)	1 мин на линию для каждой частоты
2	Сканируйте подошву стопы		

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите процедуру через **6 месяцев**, если будет необходимо.

**ПОДАГРУ** тоже можно лечить с помощью этой процедуры, но включайте в лечение также и **пораженную область**, сканируя ее при тех же настройках по **2 мин для каждой частоты**.

