

20 мин

Медицинская
насадкаЗондовая
насадка

Оториноларингология 8

ТОНЗИЛЛИТ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
1	4 ^{ий} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
2	Миндалины	5 Гц	5 мин на точку
3	Сканируйте шею с обеих сторон от позвоночного столба	1000 Гц	2 мин на сторону

Используйте **зондовую** насадку с **обычной** оболочкой.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
4	Вставляйте зондовую насадку в ротовую полость по направлению к каждой из миндалин	1000 Гц	2 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Двух раз в день ежедневно в течение 10 дней должно быть достаточно.