

8 мин





## Урология и нефрология 2

**УРЕТРИТ** – заболевание мочеиспускательного канала.

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Бедренные артерии	5 Гц	1 мин на точку
2	Основание полового члена, спереди		
3	Половой член, спереди		
4	Головка полового члена. Если крайняя плоть не обрезана, она должна быть полностью оттянута назад		
5	Половой член, сзади		
6	Основание полового члена, сзади		
7	Промежность		

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели, затем следующий курс, если будет необходимо.

