

Общие замечания

- 1** coMra-терапия прекрасно подходит для лечения **животных**, крупных и мелких, а также **домашних и диких птиц**.
- 2** Для **домашних животных**, таких как кошки и собаки, овцы, козы и свиньи, а также домашней птицы используйте **те же процедуры**, что и для **людей**, в том числе частоты и время воздействия, которые даны для людей.
- 3** Для **крупных животных**, таких как лошади и крупный рогатый скот, лечебные процедуры будут такими же, как для людей, за исключением того, что время воздействия, которое было указано для людей, должно быть **увеличено на 2 мин** на каждую точку.
- 4** Мелким **птицам** лучше **медленно** и **мягко** обрабатывать всю поверхность **головы**, используя **меридианную** насадку в течение **1 мин** при **50 Гц**. Затем обработать **тело** птицы в течение **5 мин** при **50 Гц**.
- 5** Процедуры для животных и птиц следует делать раз **в два** дня, но проводить не более **15 сеансов**, а затем сделать перерыв на **3 недели**.