

54 мин ±



Медицинская
насадка



Эстетическая
насадка

Аутоиммунная 16

КОЖНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

ПРОЦЕДУРА А (РАННЕЕ УТРО)

1 Общая 5 (программа 2)

Делайте **один раз** каждое утро.

2 Общая 3 (кровь)

Делайте **через день**, как предписано в данном руководстве пользователя.

ПРОЦЕДУРА Б (РАННИЙ ВЕЧЕР)

Используйте **эстетическую** насадку.

НО.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Δ	ВРЕМЯ Δ
1	А. Сканируйте пораженные участки кожи, медленно делая «восьмерку»	1000 Гц	3 мин на 10 см ²
	Б. Повторите сканирование пораженных участков	50 Гц	1 мин на 10 см ²

ПРОЦЕДУРА В (ПЕРЕД СНОМ)

Общая 5 (программа 2)

Делайте **один раз в день** на ночь.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

За исключением процедуры А-2, которая делается через день, проводите вышеописанный курс процедур **каждый день без каких-либо перерывов**, упомянутых для разных процедур, до наступления **заметного улучшения**. После этого **перерыв на 2 недели**, затем **следующий** курс процедур и снова перерыв на 2 недели. Повторяйте весь этот цикл до полного выздоровления.

