



Медицинская  
насадка

## Хирургия 3

- ▶ **ОПУХАНИЕ**
- ▶ **ВОСПАЛЕНИЕ ТКАНЕЙ** [в случае гнойных воспалений – см. “Хирургия 4”]
- ▶ **ОТЕК НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ** [вместе с “Хирургия 7”]
- ▶ **ГИДРАДЕНИТ** – воспаление потовых желез
- ▶ **ПАНАРИЦИЙ** – воспаление пальца под ногтем

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

#### ОПУХАНИЕ, ВОСПАЛЕНИЕ ТКАНЕЙ, ГИДРАДЕНИТ, ПАНАРИЦИЙ

- 1**
  - А.** Если какие-то из вышеперечисленных повреждений расположены где-либо на теле или лице, кроме областей **головы**, затрагивающих головной мозг, прикладывайте насадку к поверхности кожи пораженной области на протяжении **2 мин** при **5 Гц**, затем еще по **3 мин** при **50 Гц** на каждые 10 см<sup>2</sup> поверхности.
  - Б.** Если повреждение находится **на голове**, обрабатывайте пораженную область в течение **5 мин** при **50 Гц** на каждые 10 см<sup>2</sup> поверхности. Ультразвук должен быть **ВЫКЛЮЧЕН**.
  - В.** Если пациент испытывает острую боль, обрабатывайте пораженную область по **5 мин** на каждые 10 см<sup>2</sup> поверхности на **переменной настройке (V)**.
- 2** Проводите процедуру “**Общая 3 (кровь)**” вместе с шагом 1 А, Б или В.

**Дважды в день**, пока не будет достигнуто улучшение.