

13 мин





## Неврология 7

### ЗАИКАНИЕ

#### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте зондовую насадку с удлиненной оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Прикладывайте КОНЧИК зондовой насадки к каждой точке, показанной на рисунке	1000 Гц	1 мин на точку
2	Используйте медицинскую насадку	50 Гц	1 мин на точку
3	Используйте медицинскую насадку	5 Гц	1 мин на точку

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели перед тем, как проводить еще один курс процедур. Затем **повторите полный курс** столько раз, сколько будет необходимо, пока не заметите улучшений. В дальнейшем все зависит от уверенности самого пациента в том, что он излечился от заикания.

