

Травматология 7

8 мин



👁️ **ЛУЧЕЗАПЯСТНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ** – болезненное запястье.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку и лечите только пораженную сторону.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Стороны сочленения	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты
2	Сочленение со стороны ладони		
3	Сочленение с тыльной стороны руки		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день в течение 10 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите процедуру через **6 месяцев**, если будет необходимо.

